

Evakuační PODLOŽKA

rychlaevakuace.cz

Vážení zákazníci, kolegové,

rozhodli jsme se Vám po dobré zkušenosti z roku 2010 nabídnout výrobek, který Vám pomůže zkvalitnit péči ve Vaší organizaci. Pomůže Vám eliminovat možné rizikové situace a zvýší bezpečnost Vašich uživatelů.

Jde o **EVAKUAČNÍ PODLOŽKU**. Tento nový prostředek rychlé evakuace Vám zajistí možnost rychlého přesunu částečně nebo plně imobilních uživatelů v případě potřeby (požár, zakouření místnosti či budovy, povodeň atd.).

Evakuaci je schopen provádět každý člen Vašeho pracovního týmu, již po prvním zaškolení Evakuační podložka je nehořlavá a velmi odolná, v běžném provozu prakticky nezničitelná

Evakuační podložku dodáváme s návodem na použití a samolepkou, kterou si můžete označit lůžko, případně pokoj vybavený tímto záchraným systémem.

Věříme že zavedení tohoto záchraného systému pomůže zkvalitnit Vaši péči, jak z hlediska Vašich uživatelů, tak z hlediska Vašeho zřízovatele či kontrol ze strany kompetentních orgánů.

.....

Cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme na základě Vaší žádosti.





Objednávky je možné učinit na našem webu

rychlaevakuace.cz



Evakuační PODLOŽKA

rychlaevakuace.cz

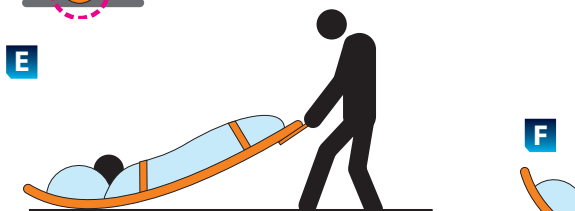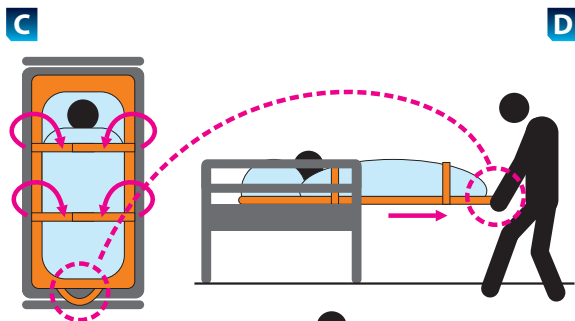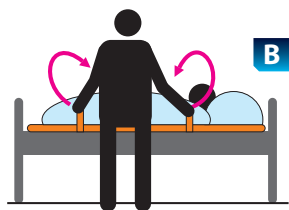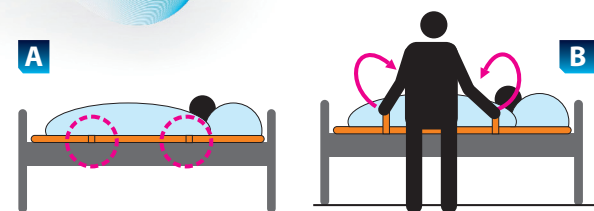

Postup evakuace s evakuační podložkou

A | Uvolněte fixační popruhy

B | Informujte evakuovaného
a pevně ho připoutejte

C | Proveďte kontrolu fixace

D | Otočte evakuační podložku o 90° a
stáhněte evakuovaného z postele na zem

E | Evakuace po podlaze

F | Evakuace po schodišti